Semimascherina filtrante antipolvere NR

prodotta con materiali e procedimenti produttivi parzialmente compatibili a quelli utilizzati per la produzione di mascherine con grado di protezione FFP2. Prodotto in deroga alle normative vigenti in base al D.L.18 del 17/3/2020. Non è una mascherina FFP2.

NOTA INFORMATIVA

NR = Non riutilizzabile

Consultare aueste istruzioni prima dell'utilizzo:

APPLICAZIONI: possono essere utilizzate solo da cittadini che intendano usarle a scopo precauzionale a condizione che rispettino le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre norme precauzionali in considerazione della loro limitata capacità protettiva ai fini del contagio da COVID-19. Prodotto in deroga alle normative vigenti in base al D.L. 18 del 17/3/2020 seguendo parzialmente le linee quida del regolamento EN 149:2001 +A1:2009 relativo alle semimascherine filtranti monouso. Il prodotto è stato sottoposto ad alcuni test richiesti della norma EN149:2001 +A1:2009, facciali filtranti da usare contro le polveri. Non è un dispositivo medico.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'UTILIZZO: prima dell'utilizzo verificare che la mascherina e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni. In caso di danni, NON UTILIZZARE. Prendere una nuova mascherina.

ISTRUZIONI D'USO:











- 1. Guardando la mascherina dal lato opposto a quello dove c'è la clip del naso afferrare con le due mani i due lacci per le orecchie. La clip del naso deve essere rivolta verso l'alto.
- Coprire il mento con la parte bassa della mascherina.
- 3. Indossare i lacci per le orecchie e aggiustarli per rendere la mascherina il più confortevole possibile.
- 4. Aiutandosi con le dita di entrambe le mani modellare la clip per il naso con leggere pressioni affinché aderisca bene al setto nasale.
- 5. Prima di uscire da una zona considerata priva di rischi e comunque prima di entrare in un'area considerata potenzialmente a rischio è necessario assicurarsi che la mascherina aderisca bene al volto. Coprire la mascherina con entrambe le mani per evitare di modificare la posizione della mascherina sulla faccia. Espirare con decisione. In caso uscisse aria dalla parte della clip per il naso, risistemare la clip affinché aderisca bene come da punto 4 precedente. Se l'aria dovesse uscire dal bordo della mascherina, aggiustare i lacci. Per assicurarsi di averla indossata bene, ripetere eventualmente i passaggi da 1 a 4.

N.B: Nel caso in cui non sia possibile ottenere una tenuta perfetta, non entrare in aree contaminate. Sostituire la mascherina immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o se la mascherina subisce danneggiamenti, o per problemi di aderenza al viso. L'osservanza attenta di queste istruzioni è un passo importante per l'uso sicuro della mascherina.

- L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo della mascherina prima dell'impiego.
- La mancata osservanza delle modalità d'impiego e delle avvertenze riquardanti l'utilizzo della mascherina, durante tutto il periodo di
- esposizione ai contaminanti, può ridurne l'efficienza e causare il verificarsi di malattie o danni permanenti.
- Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso errato della mascherina.
- Indossare la mascherina e verificarne la tenuta prima di entrare nella zona contaminata.
- Non alterare o modificare in alcun modo la mascherina.
- Questa mascherina non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in ambienti adequatamente ventilati e con sufficiente livello d'ossigeno. Non utilizzare in ambienti in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 19,5%.
- Non usare in ambienti in cui i contaminanti e le loro concentrazioni sono ignote.
- Non utilizzare in atmosfere dove c'è pericolo di esplosione o per operazioni antincendio.
- · Barba, basette lunghe e certe caratteristiche respiratorie possono ridurre l'efficienza e la tenuta della mascherina. • Eliminare e sostituire immediatamente la mascherina se la stessa è stata tolta in area contaminata, se risulta danneggiata o se la
- respirazione diventa difficoltosa.
- Abbandonare immediatamente l'area contaminata se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono senso di angoscia, vertigini o altri disagi.
- La mascherina, essendo monouso, deve essere eliminata al termine del suo utilizzo smaltendola in conformità con le normative. Non richiede pertanto alcun tipo di manutenzione.
- Conservare le mascherine non ancora utilizzate nelle loro confezioni integre in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.
- Questa mascherina può essere utilizzata una sola volta (per un massimo di 8 ore) e non deve essere riutilizzata.

Condizioni di conservazione - range di temperatura: conservare ad una temperatura compresa tra i -10 ed i 40 °C Condizioni di conservazione - umidità relativa massima: 80%

Norme attuative e livello di protezione: prodotto parzialmente secondo le linee quida del regolamento EN 149:2001 + A1:2009 relativo alla classe di protezione FFP2. Non è una mascherina FFP2

Periodo di conservazione: 36 mesi non aperte e comunque non oltre la revoca del D.L. 17/3/2020

Data di scadenza: vedere sulla confezione Lotto di produzione: vedere sulla confezione Prodotto in PRC

Polonord Adeste Srl - Via C. Bonazzi 7, 40013 Castel Maggiore (BO), Italia - Azienda con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015